

Informazione per l'uso corretto delle maschere protettive

Prima di ogni utilizzo delle mascherine è indispensabile procedere a un'accurata igiene e disinfezione delle mani! Le varie mascherine si distinguono per le diverse proprietà filtranti.

Per garantire una protezione ideale, le maschere FFP devono aderire quanto meglio possibile a naso e volto. La barba rappresenta in tal senso un grave problema.

- **Mascherine-FFP (Filtering Face Piece):**



Mascherina FFP1:

filtra l'80% delle particelle ambientali.
È indicata nell'ambito dell'edilizia e dell'industria alimentare.

Mascherina FFP2:



adatta per la protezione dalle infezioni trasmesse per via aerea (ad es. tubercolosi).
Può catturare almeno il 94% delle particelle trasportate dall'aria fino ad una dimensione di 0,6 µm. **Deve essere indossata in presenza di persone infette o potenzialmente a rischio di contagio!**

Mascherina FFP3:



offre la massima protezione possibile dall'aria respirata contaminata (99%). Il filtro nella maschera serve a facilitare l'espiazione. **Dev'essere indossata in presenza di persone infette o potenzialmente tali, in particolare nelle situazioni in cui vi sia maggiore aerosolizzazione** (ad esempio durante una manovra di aspirazione)

- **Mascherina chirurgica:**



questa maschera multistrato è indossata principalmente da pazienti potenzialmente infettivi per le altre persone. Le gocce non possono sfuggire all'esterno. Modellare bene la maschera sopra il naso e contro il viso per una tenuta ideale.

Fate **attenzione** quando togliete le maschere!

Le maschere vanno rimosse da dietro (senza toccare la parte anteriore) e poi smaltite correttamente. Al termine, è importante ripetere l'igiene delle mani.